

GLUBRAN®2

# Applicatori



## Ampia gamma per procedure personalizzate



I dispositivi **Goccia a goccia** sono progettati per applicazioni puntiformi del Glubran® 2 per sfruttare la proprietà adesiva in sostituzione o rinforzo della sutura; oppure per ricoprire piccole aree, per fare emostasi o sigillare. Il prodotto deve essere applicato in una quantità di circa una goccia per cm<sup>2</sup>.


Il **Puntale applicatore** per la chirurgia *open* è dotato di una estremità a pennello per l'applicazione in strato sottile. Particolarmente indicato per la distribuzione del Glubran® 2 come sigillante di anastomosi e rinforzo di suture.

I **Cateteri laparoscopici flessibile e rigido** sono indicati per gocciolare il Glubran® 2 come emostatico, adesivo e sigillante nelle procedure chirurgiche laparoscopiche.

I **Nebulizzatori** con propulsione gassosa autonoma (spray) sono stati ideati per esaltare tutte le proprietà del Glubran® 2, sia nelle procedure chirurgiche laparotomiche che laparoscopiche, grazie alla formazione di un film sottile di prodotto.

### Nebulizzatori

- La preparazione è semplice e veloce
- Sono sistemi indipendenti monouso
- Non necessitano di regolatori di pressione
- Non si collegano agli attacchi dell'aria della sala operatoria o a bombole di CO<sub>2</sub>
- Il propellente inerte per la nebulizzazione è atossico, biocompatibile, con un'autonomia di 8 min in erogazione continua
- La pressione in uscita è costante e controllata con nessun rischio di embolia gassosa

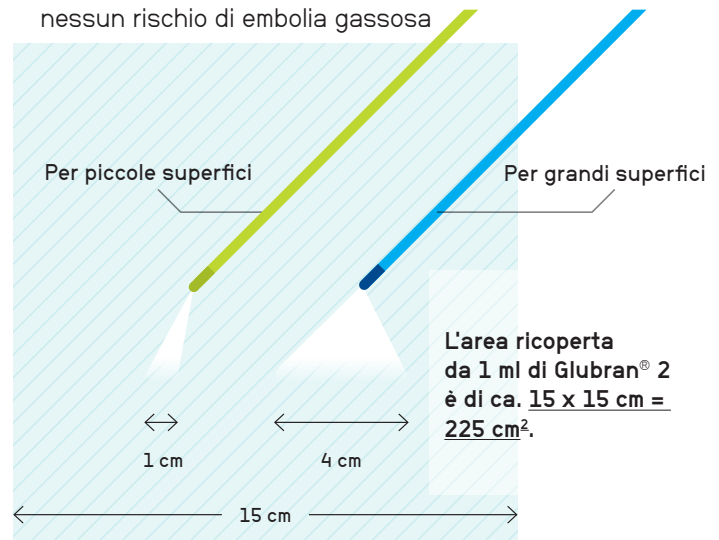

**Dispositivi per applicazioni goccia a goccia**



G2-DCD-210-8T



G-LLS

**Puntale per applicazioni in strato sottile**



G-DT

**Cateteri laparoscopici per applicazioni goccia a goccia**



G2-LPC FLESSIBILE



G2-LPC-RIG RIGIDO

**Nebulizzatori**

APPLICAZIONI

DISTANZA DAL TESSUTO

DIAMETRO DI NEBULIZZAZIONE

CARATTERISTICHE

RAZIONALE

NEBULIZZATORE  
G2-NBT



5-7 cm

4 cm

Flessibile, per ampie superfici, facilmente direzionabile, adatto anche per chirurgia open

NEBULIZZATORE SMALL  
G2-NBT-SMALL



In laparoscopia toracoscopia

2-3 cm

1 cm

Flessibile, per piccole superfici, facilmente direzionabile, adatto anche per chirurgia open

SIGILLATURA

NEBULIZZATORE RIGIDO  
G2-NBT-RIG



5-7 cm

4 cm

Rigido, per ampie superfici

EMOSTASI

RINFORZO

AEROSTASI

NEBULIZZATORE CORTO  
G2-NBT-SHORT



5-7 cm

4 cm

Corto, per ampie superfici

BILIOSTASI

NEBULIZZATORE MINI CORTO  
G2-NBT-SM-SHORT



In open


1 cm

1 cm

Corto, per piccole superfici

GLUTÄCK

**Dispositivo laparoscopico per fissaggio atraumatico delle protesi erniarie**

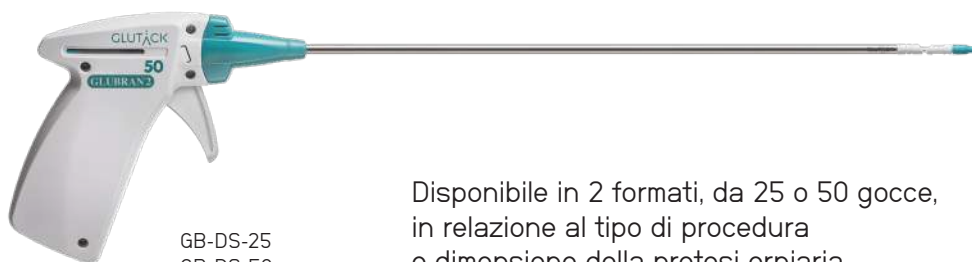

GB-DS-25  
GB-DS-50

Disponibile in 2 formati, da 25 o 50 gocce, in relazione al tipo di procedura e dimensione della protesi erniaria

