



CE
0476

LEM SelfSuction ist ein Gerät für einen einzelnen Patienten für die Gummibandligatur und Absaugung von Hämorrhoiden. **Es benötigt keinen externen chirurgischen Sauger.** Optimale Sicht auf den zu behandelnden Bereich.

ART DER ANWENDUNG

1. Das Gummiband mit dem Ringlader auf den Konus schieben.
2. Den Kolben drücken und unter der Festhaltevorrchtung blockieren
3. Die Gummibandligatur auf die zu bindenden Hämorrhoiden legen
4. Den Kolben nach unten schieben, um ihn von der Festhaltevorrchtung zu befreien
5. Das Knötchen absaugen, den Kolbenhub mit dem Daumen regeln, und etwa 30 Sek. warten, bis die Absaugung wirkt
6. Den Auslöser der Ligatur drücken, um das Gummiband an der Basis des zu bindenden Knötchens zu positionieren.

Zum Herausziehen der Ligatur erneut den Kolben drücken, um den Druck zu reduzieren, und den Auslöser bis zum Anschlag drücken.

Lem SelfSuction ermöglicht es, Gummibandligaturen und Absaugung in vollkommener Autonomie auszuführen .

Es stehen auch folgende Versionen zur Verfügung:

- **REV A.5670.3:** Packung mit 3 elastischen Ringen für Ligatur
- **REV A.5670.5:** Packung mit 5 elastischen Ringen für Ligatur

* Saugkraft des Kolbens von Lem SelfSuction entspricht -37.000 Pa. **Nicht mit dem aktiven Gerät verbinden.**

sapimed^{S.p.A.}

via della chimica, 6 - 15121 AL - Italia Tel. + 39-0131-348109 - fax: +39-0131-348383, info@sapimed.com - www.sapimed.com