


Sets de cricothyrotomie VBM

Quicktrach I / Quicktrach II avec ballonnet

En urgence, la cricothyrotomie permet d'éviter l'asphyxie en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures si une intubation ou trachéotomie ne sont pas possibles (p. ex. traumatisme facial, œdème de la glotte, corps étrangers, carcinome du larynx). VBM propose des kits stériles avec les avantages suivants:

- sets stériles pré-assemblés sont immédiatement disponibles à l'emploi
- extrémité meulée de l'aiguille évite la nécessité d'une incision préalable avec scalpel et réduit ainsi le risque d'hémorragie
- butée évitant à l'aiguille d'être trop insérée, diminuant le risque de lésion de la paroi postérieure de la trachée
- lanière pour fixation rapide et efficace
- accès le plus rapide de l'airway grâce à une procédure en une seule manipulation

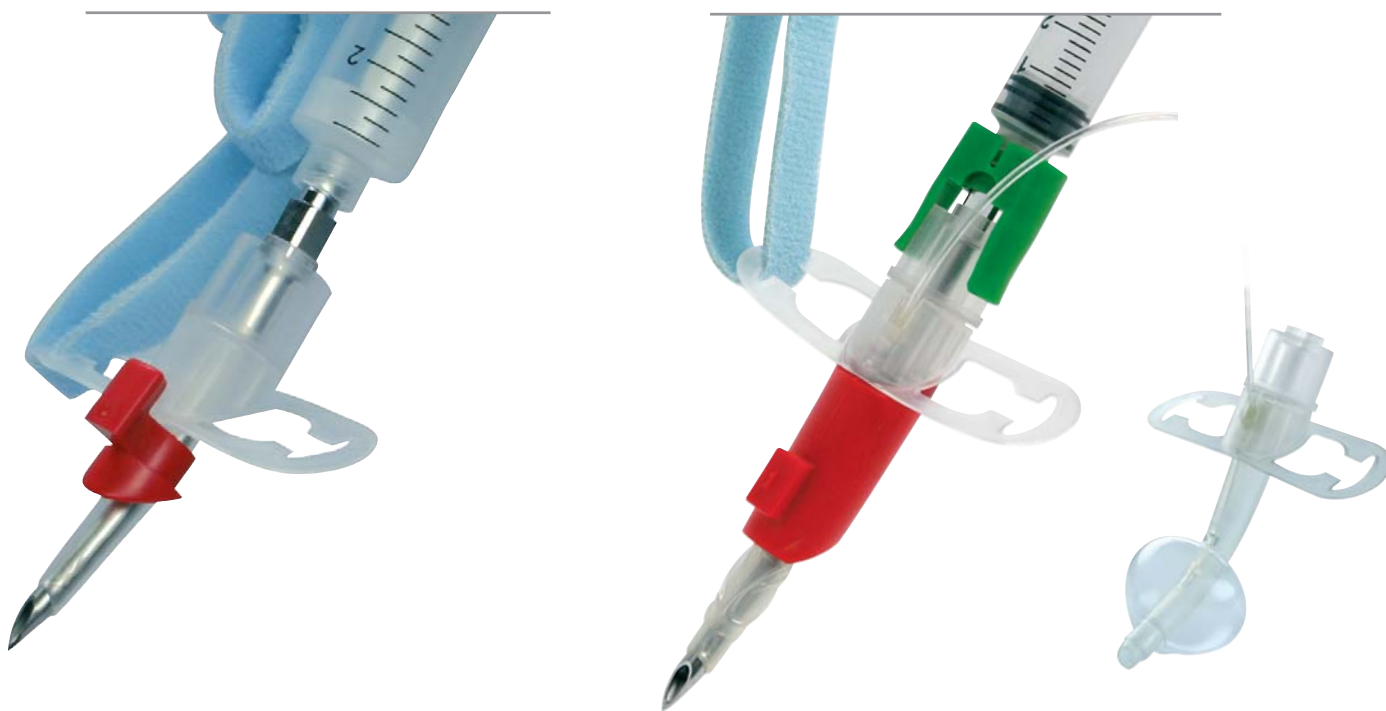

Quicktrach I

emballage en carton, stérile

REF	D.I.	patient	boîte
30-04-015-1	1.5 mm	petit enfant	1
30-04-002-1	2.0 mm	enfant	1
30-04-004-1	4.0 mm	adulte	1

Quicktrach II avec ballonnet

emballage en carton, stérile

REF	D.I.	patient	boîte
30-10-004-1	4.0mm	adulte	1

emballage en tube plastifié, stérile

- spécialement conçu pour les sacoches d'urgences car compact et robuste




Quicktrach I

REF	D.I.	patient	boîte
30-04-902-1	2.0 mm	enfant	1
30-04-904-1	4.0 mm	adulte	1

Quicktrach II avec ballonnet

REF	D.I.	patient	boîte
30-10-904-1	4,0 mm	adulte	1

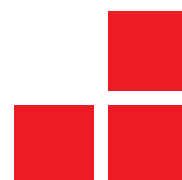

Quicktrach I

Lanière

- pour une fixation sûre
- matériau souple en mousse

«Bloc-stop»

- évite à l'aiguille d'être trop insérée, diminuant le risque de lésion de la paroi postérieure de la trachée

Aiguille métallique

- extrémité meulée de l'aiguille ne coupe que 2mm et dilate à 4mm (taille adulte)
- évite la nécessité d'une incision préalable avec scalpel

Quicktrach II avec ballonnet

Clip de sécurité

La canule en plastique est avancée jusqu'à ce que le bloc-stop se clique en position.

Le clip de sécurité est fixé fermement au raccord et donc évite que l'aiguille métallique ne ressorte encore de la canule par erreur.

La canule en plastique protège l'extrémité de l'aiguille afin d'éviter tout traumatisme de la paroi postérieure.

«Mémoire de forme»

Après avoir retiré l'aiguille, la canule de forme anatomique s'ajuste à la trachée grâce à la «mémoire de forme».

Lanière

- pour une fixation sûre
- matériau souple en mousse

«Bloc-stop»

évite à l'aiguille d'être trop insérée, diminuant le risque de lésion de la paroi postérieure de la trachée

Ballonnet

- permet une ventilation améliorée sans aspiration
- matériau fin et très robuste

Aiguille métallique

- extrémité meulée de l'aiguille ne coupe que 2 mm et dilate à 4 mm (taille adulte)
- évite la nécessité d'une incision préalable avec scalpel

VBM France sarl

ZAC de la Ferrage | Avenue Maréchal Leclerc | 13980 Alleins
Tél: 04 42 46 79 53 | Fax: 04 42 46 79 54 | e-mail: info@vbm-medical.fr

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | DE-72172 Sulz a.N. | Germany
Tel.: +49 7454 / 959610 | Fax: +49 7454 / 959633
e-mail: info@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de



CE
0123